

SALJOL

Sessel-Akku

Gebrauchsanleitung | User manual

DE

Zertifikat: IEC62133-2:2017



1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis.....	2
2. Sicherheitshinweise.....	4
2.1. Symbole und Hinweise.....	4
2.2. Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	6
4. Technische Daten.....	7
5. LED-Anzeige.....	8
6. Schutz.....	10
7. Lieferumfang.....	10
8. Akku anschließen und trennen.....	11
8.1. Akku aufladen.....	11
8.2. Akku anschließen.....	12
8.2.1. Club2 Mobil.....	12
8.3. Akku trennen.....	17
9. Wartung.....	17
10. Reparatur.....	18
11. Lagerung und Entladung des Akkus.....	18
12. Transport.....	19
13. Entsorgung.....	19
14. Garantie.....	19

2. Sicherheitshinweise

2.1. Symbole und Hinweise

Die Anleitung verwendet Symbole, Signalworte und Hinweise, um vor Gefährdungen zu warnen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Nachfolgend sind die Symbole dargestellt und erläutert.



Gefahr

Dieses Signalwort kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Nichtbeachten kann zu schwersten bis tödlichen Verletzungen führen.



Hinweis

Dieses Signalwort kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Nichtbeachten kann zu Sachschäden führen.



Risiko durch elektrische Spannung

2.2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr und Spannung:

- Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig lesen!
- Der Akku darf nur von Personen genutzt, angeschlossen oder installiert werden, die mit dem Umgang ausreichend geschult wurden und sich an die Bedienungsanleitung halten.
- Akku nur mit dem Netzteil des Club2 Mobil aufladen.
- Akku darf keinen Hitzequellen ausgesetzt werden.
- Akku vor Feuer schützen.
- Akku vor Spritzwasser, sehr hoher Luftfeuchtigkeit und vor Wasser oder anderen Flüssigkeiten schützen.
- Die beiden Kabel des Akkus niemals miteinander verbinden.
- Bei unsachgemäßem Umgang mit Lithium-Batterien besteht Brand-, Explosions- und Ätzgefahr! Unbedingt Angaben des Akkuherstellers beachten!
- Ein überhitzter Akku darf nicht geladen werden! Der Akku muss zuvor auf Umgebungstemperatur abgekühlt sein. Ladevorgang abbrechen, wenn sich der Akku zu sehr erhitzt. (>55 °C)
- Akku nicht öffnen. Am Akku gibt es keine Teile, die händisch gewartet werden müssen!
- Bei sichtbaren Beschädigungen am Kabel oder Gehäuse den Akku nicht mehr verwenden.

- Kinder sollten den Akku nicht benutzen. Bei Lagerung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Der Akku darf nur von Saljol freigegebenen Produkten betrieben oder geladen werden. Die Verwendung mit anderen Produkten, die nicht von Saljol freigegeben sind, ist untersagt und kann Personen- oder Sachschäden zur Folge haben.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Akku darf nur in Kombination mit Sesseln von Saljol verwendet werden. Bitte fragen Sie bei Saljol nach, falls Unklarheit besteht, ob der Akku für Ihren Sessel geeignet ist.
- Reparaturen dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Der Akku darf nur mit dem Netzteil des Sessels geladen werden.
- Den Akku vor der ersten Nutzung mindestens 7 Stunden laden.

4. Technische Daten

Model Name	TBB8
Akkukapazität	14.4V / 1.5Ah (1500mAh)
Nennspannung	24-35V DC
Ausgangsleistung / Spannung	24V DC, 2A (maximaler Entladungsstrom 5A)
Belastungszyklus	10% (2 Min an / 18 min aus)
Einsatztemperatur	0-40°C
Lagerungstemperatur	0-40°C
Maße	143mm*85mm*29mm
Gewicht	0.6 kg
Zertifikat	IEC62133-2:2017

5. LED Anzeige

Folgende Tabelle zeigt den Status, den der Akku haben kann, wenn er benutzt wird:

Prozess	Status	
Beim Laden	Fast voll geladen	Noch nicht aufgeladen
Beim Entladen	Hohe Ladung	Niedrige Ladung
Andere	Schutz	Fehler

Die folgende Tabelle zeigt an, welche optischen (LED) und akustischen (Alarm) Signale welchen Status markieren:

Status	Kapazität	LED		Alarm
Fast voll geladen	>90%	Grün	Permanent an	aus
Noch nicht voll geladen	<90%	Orange	Permanent an	aus
Noch nicht geladen	<25%	Rot	Permanent an	aus
Hohe Ladung	>25%	-	aus	aus
Niedrige Ladung	<25%	-	aus	an
Schutz	<20%	-	aus	aus

6. Schutz

Unter folgenden Bedingungen ist die LED permanent aus und ohne Alarm:

Schutztyp	Wenn	Anhaltend für
Entladungs-Überstromschutz	Strom = 5A	1~2 Min.
	Strom >11A~18A	0 Sek.
	Kurzschluss am Ausgang	0 Sek.
Standby-Niederspannungsschutz	Spannung <21V DC	0 Sek.

7. Lieferumfang

- Akku

8. Akku anschließen und trennen

8.1. Akku aufladen



Hinweis:

Das Produkt sollte unter folgenden Umständen mindestens 7 Stunden lang aufgeladen werden:

- Erste Inbetriebnahme.
- Erste Inbetriebnahme nach langer Standzeit.
- Vor Langzeitlagerung, falls kein Netzteil angeschlossen wird.



8.2. Akku anschließen:



Gefahr! Stromschlag!

Bevor der Akku angesteckt wird, muss der Sessel vom Strom getrennt sein!



Hinweis:

Bevor der Akku angesteckt wird, sollte er vollständig über das Netzteil geladen werden.


8.2.1 Club2 Mobil

a) Sessel in Aufsteherposition fahren.


b) Sessel vom Strom trennen.




c) Stoffklappe nach oben öffnen.

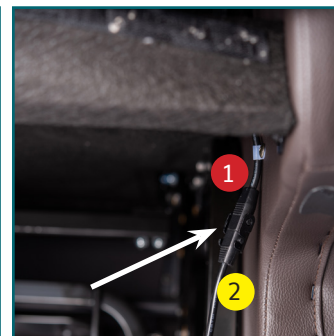


d) Falls die Kabel auf der rechten Innenseite des Sessels verbunden sind, diese Verbindung lösen.

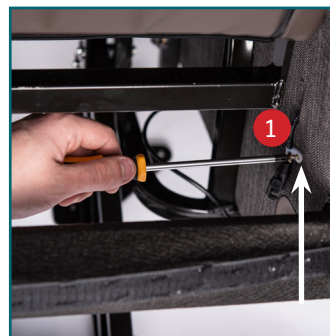


e) Fixierungsschraube am Kabel (1) lösen.

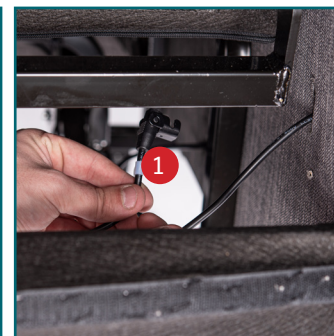


f) Kabel (1) aus der Armlehne ziehen.

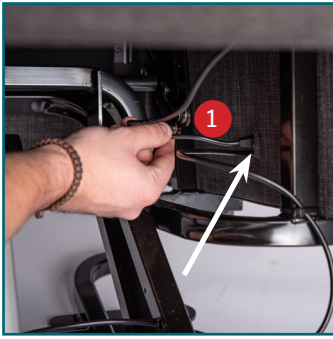


g) Kabel (1) durch die Öffnung im Stoff ziehen.

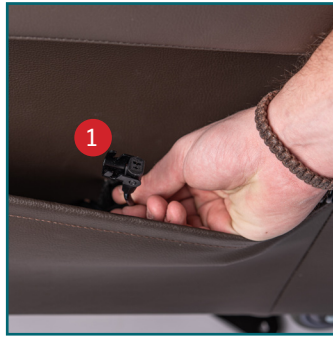



h) Das Kabel (1) kommt in der Seitentasche des Sessels heraus.

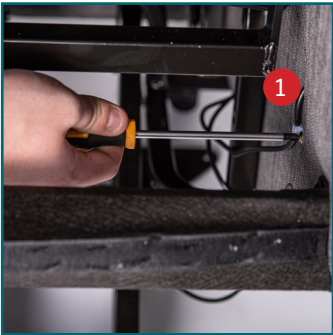

i) Fixierungsschraube wieder am Kabel (1) anbringen. (s. Schritt e)

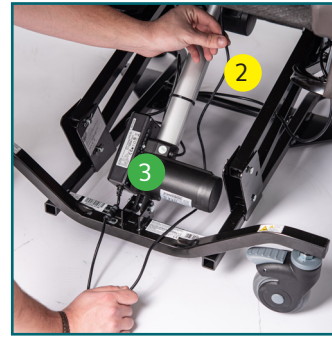

j) Kabel (2), welches aus der Kontrollbox (3) kommt wie im Bild gezeigt, verlegen.

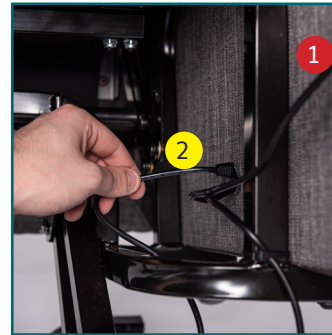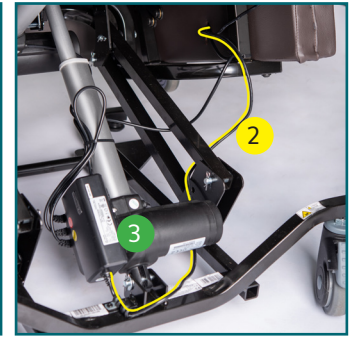

k) Dieses Kabel (2) ebenfalls durch die Öffnung im Stoff ziehen. Das Kabel kommt in der Seitentasche des Sessels heraus.



l) Beide Kabel (1) & (2) mit dem dazugehörigen Stecker des Akkus verbinden und mit der Arretierung fixieren.



- m) Den Akku sicher in der dafür vorgesehenen Tasche verwahren.
- n) Vor Nutzung des Sessels Steckverbindungen und Funktionalität prüfen. Den Sessel vorsichtig in Sitzposition fahren und prüfen, dass kein Kabel im Gestell eingeklemmt wird.
- o) Optional: Netzteil anstecken, sobald der Akku schwach ist. (s. Sessel BA)

8.3. Akku trennen:



Bevor der Akku abgesteckt wird, muss das Netzteil vom Sessel getrennt sein.



- a) Sessel in Aufstehposition fahren.
- b) Das Kabel der Kontrollbox (2) vom Akku trennen.
- c) Das Verlängerungskabel (1) vom Akku trennen.
- d) Die beiden Kabel durch die Öffnung der Seitentasche ziehen.
- e) Die Sicherungsschraube des Verlängerungskabel (1) lösen und das Kabel zurück in die Armlehne schieben. Anschließend mit der Sicherungsschraube fixieren.
- f) Das Kabel der Kontrollbox (2) hinter den Sessel legen und mit dem Netzteil verbinden.

9. Wartung

Die folgende Wartung sollte in regelmäßigen Abständen an Gehäuse, Kabeln und Steckern vollzogen werden:

- Staub und Schmutz mit einem weichen, leicht feuchten Tuch entfernen.
- Akku, Kabel und Gehäuse auf Beschädigung prüfen.
- Prüfen ob alle Stecker fest verbunden sind.

Falls der Akku für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte er stets am Netzteil angeschlossen sein, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Siehe dazu auch 11. Lagerung und Entladung des Akkus.

10. Reparatur



Gefahr! Stromschlag!

Das Gehäuse des Akku darf nicht geöffnet werden.

Der Akku hat keine Wartungsteile
Bei Beschädigung eines Kabels oder des Gehäuses sofort den Hersteller

kontaktieren und den Akku nicht mehr verwenden.

11. Lagerung und Entladung des Akkus

nach Auslieferung (100% geladen bei Erstausslieferung)

Lagerdauer	Kapazität	Status
1 Monat	80%	Benutzbar
3 Monate	70%	Vor benutzen laden
>6 Monate	<60%	Mindestens einmal alle 6 Monate mindestens 7 Stunden laden

12. Transport

Versand nur über Land- oder Seeweg, Luftfracht ist verboten.

13. Entsorgung



Li-Ion Akkupack und Netzteil nicht im Hausmüll entsorgen!

Beachten Sie hierzu die jeweiligen nationalen Gesetze.

Beim Entsorgen von Alt-Li-Ionen Akkus muss dieser elektrisch isoliert eingepackt sein, z.B. durch Abkleben der Kontakte mit Klebebändern.

14. Garantie

Ab Kaufdatum 24 Monate Gewährleistung.
6 Monate Garantie.

Die Gewährleistung und Garantie erlischt sofort durch falsche Handhabung oder wenn der Akku modifiziert, manipuliert oder geöffnet wird.



Saljol GmbH
Frauenstr. 32 | 82216 Maisach
www.saljol.de | kundenservice@saljol.de